

Scar therapy gel – Gel zur Behandlung von Narben – Gel spécialisé dans le traitement des cicatrices – Gel per il trattamento delle cicatrici – Gel para el tratamiento de cicatrices – جيل علاج آثار الجروح

[IT] Informazioni per l'impiego

Strataderm è una formulazione di gel al silicone trasparente che si asciuga rapidamente, non appiccicoso, per il trattamento delle cicatrici, sia vecchie sia nuove.

Strataderm si applica facilmente in tutte le aree epidermiche, incluse quelle esposte quali il volto e il collo, come pure le articolazioni e le aree pilifere senza bisogno di rasatura.

Se usato secondo le istruzioni, Strataderm si asciuga in modo da formare una pellicola di gel al silicone, uno strato protettivo permeabile ai gas e resistente all'acqua che idrata e protegge le cicatrici da invasioni chimiche e microbiche, permettendo alle cicatrici di normalizzare i cicli di sintesi del collagene e facendole maturare normalmente.

Strataderm è usato per ammorbidire e abbassare le cicatrici, alleviare il prurito e il fastidio provocati dalle cicatrici come pure ridurre l'arrossamento e lo scolorimento associati alle cicatrici.

Strataderm è stato sviluppato per l'uso su tutti i tipi di cicatrici, incluse quelle risultanti da: interventi chirurgici, trauma, ferite croniche, ustioni, morsi, acne e altre malattie della pelle.

Secondo le Raccomandazioni cliniche internazionali del 2002 sul trattamento delle cicatrici, "il gel al silicone deve essere usato come terapia di prima linea nel trattamento iniziale delle cicatrici e nella prevenzione dei cheloidi e delle cicatrici ipertrofiche".*

Uso previsto: Strataderm è usato per la prevenzione e il trattamento dei cheloidi e delle cicatrici ipertrofiche. Strataderm può anche essere usato in combinazione con altre opzioni invasive di trattamento delle cicatrici per migliorare i risultati complessivi, incluse: escissione chirurgica e risutura, iniezioni intralesionali e indumenti compressivi. Strataderm è adatto per i bambini e per le persone con pelle sensibile.

Istruzioni per l'uso: Assicurarsi che la cicatrice sia pulita e asciutta. Applicare uno strato molto sottile di Strataderm sulla cicatrice e lasciar asciugare. Strataderm deve essere applicato una volta al giorno, oppure due volte al giorno sulle aree esposte. Per ottenere risultati ottimali, Strataderm deve essere mantenuto continuamente a contatto con la pelle (24 ore su 24) oppure come da parere del medico. Se applicato correttamente, Strataderm dovrebbe asciugarsi in 3–4 minuti. Se impiega più tempo, è stata probabilmente applicata una quantità eccessiva. Rimuovere delicatamente la quantità in eccesso con un tessuto e lasciar continuare il processo di asciugatura. Una volta asciutto, Strataderm può essere coperto da creme solari, cosmetici oppure indumenti compressivi o gessi.

Durata raccomandata del trattamento

La durata minima raccomandata del trattamento con Strataderm è di 60–90 giorni (24 ore su 24, 7 giorni su 7). Le cicatrici più lunghe e più vecchie possono richiedere più tempo. Se ne raccomanda l'uso continuativo fino a ottenere ulteriori miglioramenti.

Quanto Strataderm serve?

- **Quantità 5 g** è sufficiente a trattare una cicatrice lunga 2–3 cm due volte al giorno per un periodo fino a 90 giorni.
- **Quantità 10 g** è sufficiente a trattare una cicatrice lunga 5–7 cm due volte al giorno per un periodo fino a 90 giorni.
- **Quantità 20 g** è sufficiente a trattare una cicatrice lunga 10–12 cm due volte al giorno per un periodo fino a 90 giorni.
- **Quantità 50 g** è sufficiente a trattare un'area di 6×12 cm due volte al giorno per un periodo fino a 90 giorni.

Avvertenza

- Strataderm non deve essere applicato su ustioni di terzo grado o su ferite aperte.
- Strataderm non deve venire a contatto con le membrane mucose o con gli occhi.
- Strataderm non deve essere applicato su altri trattamenti epidermici senza il parere del medico.
- Strataderm può macchiare gli abiti se non è completamente asciutto.

Solo per uso esterno. In caso di irritazione, interrompere l'uso e consultare il medico. Tenere il prodotto medicinale della portata dei bambini.

Conservare a una temperatura inferiore a 25°C. Non usare dopo la data di scadenza (EXP) stampata sul tubetto.

NON STERILE

Ingredienti: Polidimetilsilossani, Silossani, Alchilmetil Siliconi

Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Produttore / Producent / Fabricante / الشركة الصانعة

Stratpharma AG
CH-4051 Basel
Switzerland / Schweiz / Suisse /
Svizzera / Suiza / سويسرا

www.strataderm.com



*Mustoe TA et al. Plast Reconstr Surg 2002; 110:560–571

Date of preparation / Stand der Information / Date de préparation / Data di preparazione / Fecha de preparación / تاريخ التحضير
10/2008

S000INTPI01-1008

 Stratpharma